


# **Dispositivo de ESP Stat-A-Dyne**

## *Instrucciones de colocación*

¿Tiene alguna pregunta? No dude en llamarnos al **866-236-8889**. También puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en [www.lantzmedical.com](http://www.lantzmedical.com).

\* Se recomienda que esté sentado o acostado mientras usa el dispositivo de control de contracturas Stat-A-Dyne.

- Extienda el dispositivo a la longitud adecuada para su antebrazo. (Ajuste la longitud al aflojar los dos tornillos que se encuentran al costado del dispositivo).
- Una vez que se haya ajustado el largo del dispositivo, coloque el dispositivo primero poniendo el antebrazo en el manguito distal (alejado) e insertando el pulgar a través del orificio para el pulgar.  
\* El pulgar debe pasar cómodamente por el orificio para el pulgar para evitar cualquier presión en el ramo superficial del nervio radial.

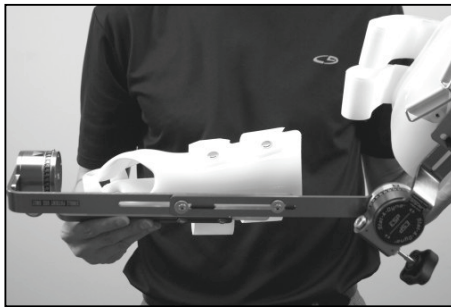

- Después de que el antebrazo esté dentro del dispositivo, puede tirar el manguito del húmero sobre el bíceps/tríceps. Lo ideal es ajustar la altura del manguito del húmero para que haya tres dedos de ancho entre la parte superior del manguito y el pliegue de la axila. (La altura del manguito del húmero puede ajustarse al aflojar las 2 tuercas mariposa al costado del dispositivo).
- Alinee la bisagra del codo con la articulación del codo.



- Ajuste las correas del antebrazo y del húmero.
- Ahora está listo para comenzar su sesión de tratamiento.