
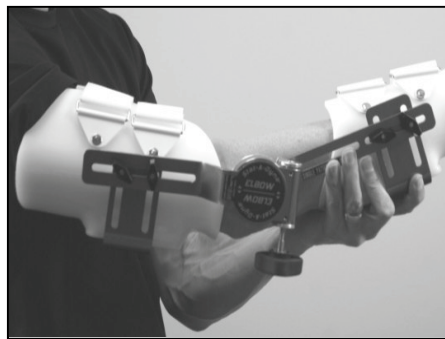


Codo Stat-A-Dyne *Instrucciones de colocación*

¿Tiene alguna pregunta? No dude en llamarnos al **866-236-8889**. También puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en www.lantzmedical.com.


*** Se recomienda que esté sentado o acostado mientras usa el dispositivo de control de contracturas Stat-A-Dyne.**

- **Para empezar, coloque el dispositivo en una posición neutra que se encuentre dentro de su amplitud de movimiento (ROM) cómoda.**
- **Deslice su brazo dentro del dispositivo. (La bisagra del dispositivo debe estar alineada con la articulación del codo). La bisagra debe estar en lado lateral (exterior) del brazo.**

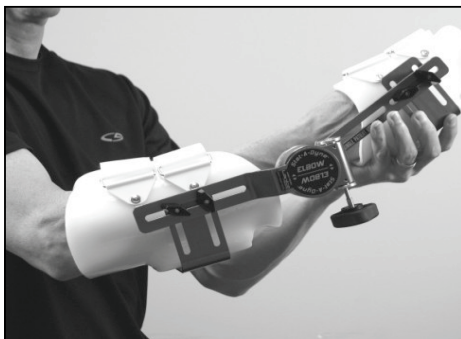

• **Ajuste la posición de los manguitos del antebrazo y del húmero.**

1. Se debe extender la longitud de la ortesis para que el manguito del antebrazo esté alineado con la mano del paciente. La bisagra del dispositivo debe estar centrada en la articulación del codo.
2. Debe haber 3 dedos de ancho entre la parte superior del manguito del húmero y el pliegue de la axila.
3. Después de fijar el largo, puede inclinar, elevar o bajar los manguitos con el soporte en forma de "L" para asegurar un ajuste óptimo. (La estructura del dispositivo debe estar alineada con los huesos largos del brazo).

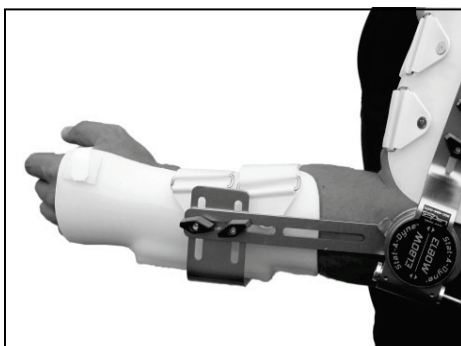

- **Una vez que el brazo esté correctamente alineado, ajuste las correas del antebrazo y del húmero.**
- **Ahora está listo para comenzar su sesión de tratamiento.**