


Rodilla Stat-A-Dyne *Instrucciones de colocación*


¿Tiene alguna pregunta? No dude en llamarnos al **866-236-8889**. También puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en www.lantzmedical.com.

* Se recomienda que esté sentado o acostado mientras usa el dispositivo de control de contracturas Stat-A-Dyne.

- Ajuste el largo de su rodilla Stat-A-Dyne para que el dispositivo sea del largo correcto para que se adapte a su pierna (1).
- Mientras esté sentado, mantenga la pierna en una posición neutra y deslice el dispositivo de ortesis para colocarlo en su lugar. La bisagra del dispositivo debe estar alineada de manera pareja con su rodilla (2). Debe estar sentado sobre el manguito del muslo cuando se ajuste el dispositivo de ortesis correctamente (3).
- Asegure las correas de los maguitos del muslo y de la pierna, no importa qué correa se ajusta primero.

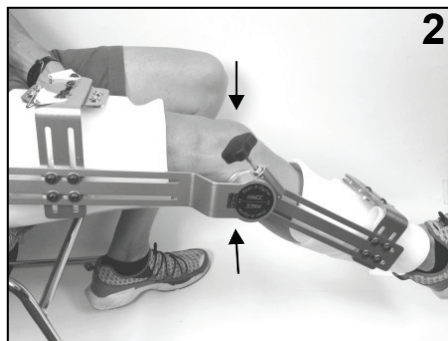

- Asegure la correa de sujeción a su cintura para evitar deslizamientos (4).
- Ahora está listo para comenzar su sesión de tratamiento.

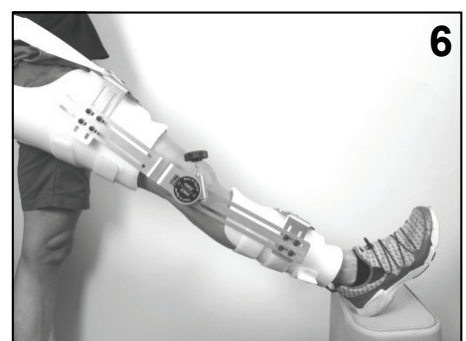

* La rodilla Stat-A-Dyne puede tratar tanto la flexión como la extensión de la rodilla. Simplemente ajuste la perilla en la dirección que le gustaría tratar. (5 flexión, 6 extensión)