

Férula de Extensión Interfalángica Proximal (PIP)

Instrucciones de colocación

¿Tiene alguna pregunta? No dude en llamarnos al **866-236-8889**. También puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en www.lantzmedical.com.

* Se recomienda que esté sentado cuando use el dispositivo.

APLICAR LA FÉRULA DE EXTENSIÓN INTERFALÁNGICA PROXIMAL (PIP) DE LANTZ MEDICAL:

- Afloje la correa de contrafuerza.
- Flexione la férula al pellizcarla para liberar la tensión. Si es necesario, afloje los tornillos.
- Deslice el dedo en la férula de modo que las levas queden alineadas con la articulación PIP del dedo. Coloque el dedo sobre el cabestrillo para el dedo. Vea la Figura 1.
- Asegure la correa de contrafuerza sobre la parte superior del dedo.
- Libere la posición flexionada de la férula para permitir la extensión del dedo.
- Mientras usa la férula de Lantz Medical, es mejor estar relajado y sentado con la mano a la altura del corazón o mientras duerme con la mano sobre una almohada sobre el corazón.

RETIRAR LA FÉRULA DE EXTENSIÓN PIP DE LANTZ MEDICAL:

- Afloje la correa de contrafuerza.
- Flexione la férula al pellizcarla para liberar la tensión. Si es necesario, afloje los tornillos.
- Retire el dedo de la férula.

Figura 1.

