

# ***Férula de Flexión Interfalángica Proximal (PIP)***

## ***Instrucciones de colocación***

¿Tiene alguna pregunta? No dude en llamarnos al **866-236-8889**. También puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en [www.lantzmedical.com](http://www.lantzmedical.com).

\* Se recomienda que esté sentado cuando use el dispositivo.

### **APLICAR LA FÉRULA DE FLEXIÓN INTERFALÁNGICA PROXIMAL (PIP) DE LANTZ MEDICAL**

- Afloje la correa de contrafuerza o ábrala por completo. Deslice el dedo en la férula de modo que las levas queden alineadas con la articulación PIP del dedo. **Vea la Figura 1.**
- El cabestrillo para el dedo se puede ajustar para que quede bien usando un destornillador de cabeza Phillips para ajustar el ancho. Coloque el destornillador dentro de la abertura del cabestrillo que tiene el tornillo y gírelo en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar y lograr un ancho cómodo. Gire en el sentido de las agujas del reloj para reducir el ancho y en el sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar el ancho. Asegure la correa de contrafuerza debajo del dedo.
- Para ajustar la tensión dinámica, gire los tornillos de carga en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la tensión y en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la tensión.

### **RETIRAR LA FÉRULA DE EXTENSIÓN PIP DE LANTZ MEDICAL:**

- Afloje la correa de contrafuerza.
- Extienda la unidad para liberar la tensión y luego retire el dedo de la férula.

**Figura 1.**

