



Férula de Extensión Interfalángica Proximal (PIP) Férula de Flexión Interfalángica Proximal (PIP)

INFORMACIÓN GENERAL/USO PREVISTO:

La flexión/extensión de la férula dinámica interfalángica proximal (PIP) de Lantz Medical está diseñada para el tratamiento de la rigidez articular y las contracturas establecidas de los tejidos blandos. El dispositivo ayuda en la flexión o extensión del dedo y solo debe usarse bajo la supervisión de un profesional de atención médica calificado. Los protocolos de uso varían según el diagnóstico y deben determinarse después de consultar con el médico del paciente. Las instrucciones adjuntas están destinadas a servir como una guía después de que su equipo de atención médica, que incluye a su representante de Lantz Medical, las ajuste a la medida y se las explique.

CONTRAINDICACIONES y PRECAUCIONES:

La férula PIP no debe usarse si se presenta alguna de las siguientes afecciones:

- * Espasticidad grave
- * Osteoporosis grave
- * Tromboflebitis

Se debe tener PRECAUCIÓN si se presenta alguna de estas afecciones:

- * Vasculopatía periférica
- * Cicatrización de heridas en la piel
- * Osteoporosis leve
- * Espasticidad/tono grave

Si presenta dolor, entumecimiento, hinchazón o irritación cutánea mientras usa la ortesis, debe retirar el dispositivo. Se debe volver a evaluar al paciente y se deben hacer los ajustes adecuados.

USO EN UN SOLO PACIENTE: Boletín de dispositivos 2006 (4):

Los dispositivos designados como de "uso en un solo paciente" no deben reutilizarse bajo ninguna circunstancia. La reutilización de dispositivos de "uso en un solo paciente" puede afectar la seguridad, el rendimiento y la eficacia clínica del dispositivo, y así exponer a los pacientes y al personal a riesgos innecesarios y contaminación cruzada. La reutilización de dispositivos de "uso en un solo paciente" tiene implicaciones legales.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO:

Limpie la férula y el exterior de la férula PIP con un limpiador no abrasivo. No use una cantidad excesiva de limpiador. El interior y las correas de la férula se pueden limpiar con agua tibia.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN:

Si esta férula PIP es un dispositivo fabricado a medida para uso en un solo paciente, una vez que usted, el paciente, haya firmado un acuerdo del paciente y haya aceptado la entrega del dispositivo, Lantz Medical no puede aceptar la devolución del dispositivo.

* Consulte el reverso de este documento para obtener información sobre la GARANTÍA.

*** Importante:** Asegúrese de usar la férula dinámica PIP según las indicaciones de su médico. **SI SIENTE ENTUMECIMIENTO, HORMIGUEO, DOLOR O HINCHAZÓN, INTERRUMPA EL USO Y LLAME A SU MÉDICO.**

Revise la tensión con su médico según las instrucciones de su visita inicial.

USO RECOMENDADO PARA
TERAPIA DE ESTIRAMIENTO DINÁMICO



1. Al comienzo de la terapia dinámica, la férula dinámica PIP debe usarse durante 1 hora el día 1. La férula dinámica PIP funciona en el modo de estiramiento DINÁMICO. Ejerce una fuerza constante sobre el tejido. Su estiramiento subjetivo no debe exceder un estiramiento 1-2 (muy leve) en el tejido blando cuando usa la férula.

*** Si la intensidad del estiramiento aumenta a más de un 2 en la escala de intensidad del estiramiento, ajuste los tornillos en sentido contrario a las agujas del reloj 1/2 vuelta para disminuir la tensión.**

- Después del retiro, el paciente presentará 1 hora de molestia leve en la articulación PIP. Si presenta molestia leve durante menos de 1 hora, ambos tornillos deben girarse 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la tensión dinámica.
- Cada día adicional, el paciente debe aumentar el programa de uso en 30 minutos, y trabajar para alcanzar una duración de 6-8 horas por día. Con el tiempo, el paciente puede dormir con el dispositivo una vez que se establezca el protocolo de uso.

INSTRUCCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN:

Si se le proporcionó un dispositivo de alquiler, encontrará un sobre de envío de devolución prepago incluido con este dispositivo. Para la devolución, comuníquese con Lantz Medical para informar que ha terminado de usar el dispositivo. Luego coloque el dispositivo en el sobre prepago en su buzón o llévelo a cualquier oficina de FedEx o a cualquier sucursal Walgreens.

Llámenos de manera gratuita al **866-236-8889** si tiene preguntas o inquietudes o si desea obtener información sobre la devolución.

GARANTÍA

Lantz Medical, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año desde la fecha de la venta. Lantz Medical, Inc. no ofrece ninguna otra garantía explícita ni implícita con respecto a este productos, LO QUE INCLUYE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR. Si este producto tiene algún defecto en el material o la mano de obra que se presenta en el plazo de un año después de la venta, Lantz Medical, por su propia cuenta, reparará el defecto o reemplazará el producto, a discreción de Lantz Medical, que será el único recurso del consumidor.

Gracias por permitirnos formar parte de su recuperación.

El equipo de Lantz Medical