


WHFO Stat-A-Dyne *Instrucciones de colocación*


¿Tiene alguna pregunta? No dude en llamarnos al **866-236-8889**. También puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en www.lantzmedical.com.

*** Se recomienda que esté sentado o acostado mientras usa el dispositivo de control de contracturas Stat-A-Dyne.**

- Ajuste la longitud de su ortesis de muñeca, mano y dedo (WHFO) para que las bisagras del dispositivo se alineen con la muñeca y las articulaciones metacarpofalángicas (MP) (los nudillos). (La longitud se ajusta aflojando el tornillo Phillips que se encuentra en el interior de la bisagra de la muñeca y extendiendo el soporte del conector de metal). El espacio entre la bisagra de la muñeca y la bisagra del dedo debe ser igual a la distancia entre la muñeca y las articulaciones MP.

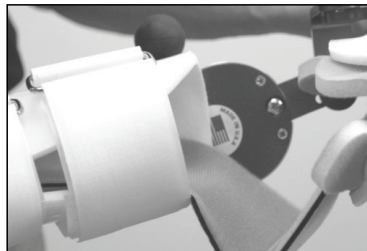

- Una vez que el dispositivo tenga la longitud adecuada, afloje las correas, deslice el antebrazo a través del manguito y meta los dedos en el guante. (Asegúrese de que sus dedos estén completamente ubicados dentro del guante).
- Empuje el antebrazo y la mano hacia adelante en el dispositivo hasta que las articulaciones MP (los nudillos) estén alineadas con la parte inferior de la bisagra del dedo. Dado que ajustamos la longitud de su dispositivo anteriormente, la bisagra de la muñeca ahora también debe estar alineada con su muñeca.
- Extienda o retraiga el manguito del antebrazo. Con el brazo doblado a 90°, debe haber 2 dedos de ancho entre el extremo del manguito del antebrazo y el pliegue del codo.

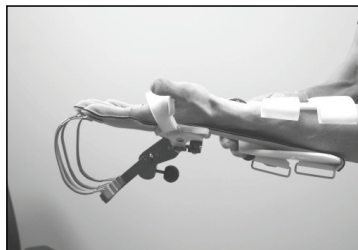

- Ajuste las correas en el antebrazo y en la palma.
- Ahora está listo para comenzar su sesión de tratamiento.